



- mejore el equilibrio, la coordinación y la flexibilidad
- ayuda a desarrollar los músculos, la coordinación y el equilibrio
- superficie antideslizante y corrugada para mayor seguridad
- movimiento limitado a una sola dirección
- soporta hasta 136 kg (300 lbs)

### Precauciones

- desarrolle los ejercicios con movimientos lentos y controlados en una zona despejada
- mantenga una postura apropiada durante la sesión de ejercicios

### ⚠ Advertencia

- Consulte a su profesional de la salud antes de empezar su recuperación o programa de ejercicios
- Usar bajo supervisión o dirección profesional
- Los rollos inflables no son a prueba de perforaciones y podrían causar lesiones corporales severas
- Ejercítense lejos de objetos afilados que puedan perforar la silla o causarle lesiones
- Retire los objetos afilados (como anillos) antes de empezar a usar la silla.
- Mantener lejos de fuentes de calor y de luz solar directa

### Inflado

El tamaño refleja las dimensiones en la capacidad máxima de inflado. Para mejores resultados utilice un inflador eléctrico para inflar la bola a su tamaño aproximado. Espere 24 horas, después finalice el proceso de inflado empleando una bomba de inflado manual. No infle de más. Puede inflarla parcialmente para una sensación suave y blanda.

### Tamaños

Tamaños disponibles: (el diámetro está a la altura máxima)

REF	color	diámetro x longitud
30-1725	naranja	16 pulgadas (40 cm) x 35 pulgadas (90 cm)
30-1726	verde	20 pulgadas (50 cm) x 39 pulgadas (100 cm)
30-1727	amarillo	24 pulgadas (60 cm) x 43 pulgadas (110 cm)
30-1728	azul	28 pulgadas (70 cm) x 47 pulgadas (120 cm)
30-1729	rojo	32 pulgadas (80 cm) x 51 pulgadas (130 cm)



Fabrication Enterprises Inc.  
PO Box 1500

White Plains, NY 10602 (USA)



tel: 914-345-9300 • 800-431-2830

fax: 914-345-9800 • 800-634-5370

www.FabEnt.com



Authorized CE representative:

RMS UK Ltd.

28 Trinity Road

Nailsea, Somerset BS48 4NU (UK)

