

CANDO® Inflable Balón-Sensi

- utilícese para mejorar el equilibrio, la coordinación, la flexibilidad y la fuerza, o solo por diversión
- superficie "nudosa" añade elementos táctiles y visuales a la terapia
- soporta hasta 136 kg (300 lbs)

Precauciones

- desarrolle los ejercicios con movimientos lentos y controlados en una zona despejada
- mantenga una postura apropiada durante la sesión de ejercicios

Advertencia

- consulte a su profesional de la salud antes de empezar su recuperación o programa de ejercicios
- usar bajo supervisión o dirección profesional
- los rollos inflables no son a prueba de perforaciones y podrían causar lesiones corporales severas
- ejercítese lejos de objetos afilados que puedan perforar la silla o causarle lesiones
- retire los objetos afilados (como anillos) antes de empezar a usar la silla.
- mantener lejos de fuentes de calor y de luz solar directa


Inflado

El tamaño del balón refleja el diámetro en la capacidad máxima de inflado. Para mejores resultados utilice un inflador eléctrico para inflar la bola a su tamaño aproximado. Espere 24 horas, después finalice el proceso de inflado empleando una bomba de inflado manual. No infle de más. Puede inflarla parcialmente para una sensación suave y blanda.

Tamaños


Diámetros sugeridos del balón para usar durante actividades mientras esta sentado.

REF	color	diámetro del balón	tamaño del usuario
30-1773	naranja	21.6 pulgadas (55 cm)	57-63 pulgadas (144-160 cm)
30-1776	verde	25.6 pulgadas (65 cm)	64-72 pulgadas (162-183 cm)
30-1777	amarillo	29.5 pulgadas (75 cm)	73-79 pulgadas (185-201 cm)
30-1778	azul	33.5 pulgadas (85 cm)	over 80 pulgadas (203 cm)
30-1779	rojo	37.4 pulgadas (95 cm)	

 Fabrication Enterprises Inc.
250 Clearbrook Rd, Suite 240
Elmsford, NY 10523 (USA)
tel: +1-914-345-9300 • 800-431-2830
fax: +1-914-345-9800 • 800-634-5370
FabEnt.com

EC REP

 AJW Technology Consulting GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf (Germany)

CanDo and  are trademarks of Goldberg.

©2021 FEI, all rights reserved.



ver 0821