

CANDO® Pelotas Saltarinas Inflables

- mejore el equilibrio, la coordinación y la flexibilidad
- puede usarse para la estimulación propioceptiva y vestibular
- superficie antideslizante y corrugada para mayor seguridad
- tiene mangos para sujetarse diseñados con el fin de brindar un control seguro
- soporta hasta 136 kg (300 lbs)

Precauciones

- desarrolle los ejercicios con movimientos lentos y controlados en una zona despejada
- mantenga una postura apropiada durante la sesión de ejercicios

Advertencia

- consulte a su profesional de la salud antes de empezar su recuperación o programa de ejercicios
- usar bajo supervisión o dirección profesional
- los rollos inflables no son a prueba de perforaciones y podrían causar lesiones corporales severas
- ejércitese lejos de objetos afilados que puedan perforar la silla o causarle lesiones
- retire los objetos afilados (como anillos) antes de empezar a usar la silla.
- mantener lejos de fuentes de calor y de luz solar directa

Inflado


El tamaño del balón refleja el diámetro en la capacidad máxima de inflado. Para mejores resultados utilice un inflador eléctrico para inflar la bola a su tamaño aproximado. Espere 24 horas, después finalice el proceso de inflado empleando una bomba de inflado manual. No infle de más. Puede inflarla parcialmente para una sensación suave y blanda.

Tamaños

Tamaños disponibles:

REF	color	diámetro del balón
30-1825	amarillo	15.8 pulgadas (40 cm)
30-1826	rojo	17.7 pulgadas (45 cm)
30-1827	verde	19.7 pulgadas (50 cm)
30-1828	azul	21.6 pulgadas (55 cm)



 Fabrication Enterprises Inc.
250 Clearbrook Rd, Suite 240
Elmsford, NY 10523 (USA)
tel: +1-914-345-9300 • 800-431-2830
fax: +1-914-345-9800 • 800-634-5370
FabEnt.com

EC **REP**

 AJW Technology Consulting GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf (Germany)

CanDo and  are trademarks of Goldberg.

©2021 FEI, all rights reserved.