

# CANDO® Pelotas Saltarinas Inflables

- mejore el equilibrio, la coordinación y la flexibilidad
- puede usarse para la estimulación propioceptiva y vestibular
- superficie antideslizante y corrugada para mayor seguridad
- tiene mangos para sujetarse diseñados con el fin de brindar un control seguro
- soporta hasta 136 kg (300 lbs)

## Precauciones

- desarrolle los ejercicios con movimientos lentos y controlados en una zona despejada
- mantenga una postura apropiada durante la sesión de ejercicios

## Advertencia

- consulte a su profesional de la salud antes de empezar su recuperación o programa de ejercicios
- usar bajo supervisión o dirección profesional
- los rollos inflables no son a prueba de perforaciones y podrían causar lesiones corporales severas
- ejércitese lejos de objetos afilados que puedan perforar la silla o causarle lesiones
- retire los objetos afilados (como anillos) antes de empezar a usar la silla.
- mantener lejos de fuentes de calor y de luz solar directa

## Inflado

El tamaño del balón refleja el diámetro en la capacidad máxima de inflado. Para mejores resultados utilice un inflador eléctrico para inflar la bola a su tamaño aproximado. Espere 24 horas, después finalice el proceso de inflado empleando una bomba de inflado manual. No infle de más. Puede inflarla parcialmente para una sensación suave y blanda.

## Tamaños

Tamaños disponibles:

<b>REF</b>	<b>color</b>	<b>diámetro del balón</b>
30-1825	amarillo	15.8 pulgadas (40 cm)
30-1826	rojo	17.7 pulgadas (45 cm)
30-1827	verde	19.7 pulgadas (50 cm)
30-1828	azul	21.6 pulgadas (55 cm)



Fabrication Enterprises Inc.  
PO Box 1500  
White Plains, NY 10602 (USA)  
tel: 914-345-9300 • 800-431-2830  
fax: 914-345-9800 • 800-634-5370  
[www.FabEnt.com](http://www.FabEnt.com)



Authorized CE representative:  
RMS UK Ltd.  
28 Trinity Road  
Nailsea, Somerset BS48 4NU (UK)